

BIOTRONIK Patient App

Download –und Registrierungsprozess

Nutzung der BIOTRONIK Patient App

Um die App nutzen zu können, müssen Sie diese aus dem Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunterladen. Damit Ihnen alle Funktionen der BIOTRONIK Patient App zur Verfügung stehen, ist es notwendig, dass Ihr Arzt Ihnen Zugriff über das BIOTRONIK Home Monitoring® Service Center gewährt.

Dieses Dokument führt Sie durch alle erforderlichen Schritte.

BIOTRONIK Patient App – sechs Schritte zum Start



1 BIOMONITOR-Implantation(III oder neueres Modell)

Nachdem Ihnen der BIOMONITOR implantiert wurde, erhalten Sie weitere wichtige Informationen von Ihrem Arzt.

2 Erhalt Ihres Patientenausweises mit einem QR-Code

Sie erhalten einen Patientenausweis mit Informationen zu Ihrem Implantat. Ihr Patientenausweis enthält einen individuellen QR-Code. Sie benötigen diesen QR-Code, um sich in der BIOTRONIK Patient App zu registrieren. Wenn Ihr Patientenausweis keinen QR-Code enthält oder Sie keinen Patientenausweis erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

3 Freischaltung für die App durch Ihren Arzt via Home Monitoring


Bitten Sie Ihren Arzt darum, Sie für die BIOTRONIK Patient App auf der Home Monitoring Plattform freizuschalten. Nur dann können Sie alle Funktionen der App nutzen.

4 Download der BIOTRONIK Patient App

Öffnen Sie mit Ihrem Smartphone (mindestens iOS 11 oder Android™ 6.0) den App Store oder Google Play Store und laden Sie sich die BIOTRONIK Patient App herunter. Der Download der App ist kostenlos. Bitte beachten Sie: Die App funktioniert ausschließlich auf Smartphones.



Suchen Sie nach „BIOTRONIK Patient App“ und laden Sie die App herunter.

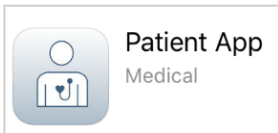

5 Registrierung mit Ihrem QR-Code

Die Registrierung für die App erfolgt in sieben Schritten:

- 1) Lesen und bestätigen Sie die rechtlichen Hinweise.
- 2) Tippen Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
- 3) Tippen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 4) Wählen Sie ein Passwort.
- 5) Scannen Sie Ihren QR-Code in Ihrem Patientenausweis mit Ihrer Smartphone-Kamera.
- 6) Übermitteln Sie Ihre Registrierung.
- 7) Nach der Übermittlung der Registrierung erhalten Sie per E-Mail einen Aktivierungslink. Klicken Sie auf den Link, um die Registrierung abzuschließen.

Alle Schritte sind selbsterklärend. Die App leitet Sie durch jeden einzelnen Schritt.

Bevor Sie mit der Registrierung beginnen

Halten Sie Ihren QR-Code bereit.

Sie benötigen ihn für die Anmeldung.

Der Aufkleber mit dem QR-Code befindet sich normalerweise in Ihrem Patientenausweis. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, falls er sich nicht dort

Patient data - Patientendaten
Données du patient

Name / Prénom / Nom / JK

Date of birth / Date de naissance

Address / Adresse / Domicile

Phone / Téléphone

Address in case of emergency / Adresse à préciser en cas d'urgence

Address of clinic / Adresse de l'hôpital / Centre d'implantation

Attending physician / Médecin traitant / Cardiologue traitant

Phone / Téléphone

Family doctor / Médecin traitant

Phone / Téléphone

ICM / ICH / MCI


Manufacturer / Type / Société / Modèle / Modèle / Série / Numéro / Fabricant / Modèle / N° série

Implantation date / Date d'implantation

First implantation / Première implantation
 Re-implantation / Réimplantation / Remplacement

Indication / Indication / Indication

Comments / Remarques / Commentaires



Patient App

BIOTRONIK

OK

Bei Schritt fünf scannen Sie Ihren QR-Code in Ihrem Patientenausweis. Damit dies möglich ist, werden Sie aufgefordert, der App Zugriff auf Ihre Smartphone-Kamera zu erteilen. Bitte erlauben Sie dies.

„PatientApp“ möchte auf deine Kamera zugreifen

Um sich für die Patienten-App zu registrieren, gewähren Sie bitte der Patienten-App Zugriff auf Ihre Kamera, mit der Sie den QR-Code scannen können.

OK

Nicht erlauben

6 Anmeldung und Nutzung der App

Nachdem Ihr Arzt Sie für die App freigeschaltet hat und Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie die App ohne Einschränkungen nutzen.

E-Mail-Adresse

Kennwort

Zugangsdaten speichern

Anmelden

Sie haben noch kein Nutzerkonto für die Patient App? Bitte registrieren Sie sich hier.

Kennwort vergessen?



BIOTRONIK
excellence for life

Sie benötigen Unterstützung?

Wenn Sie Hilfe beim Herunterladen oder der Registrierung für die BIOTRONIK Patient App benötigen, wenden Sie sich bitte an das BIOTRONIK Health Services Customer Service Center.

Tel.: +49 (0) 30 68905 2440

E-Mail: healthservices@biotronik.com

Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.